


คู่มือการใช้งาน Dai-Tok

กรุณาตรวจสอบก่อนใช้งาน

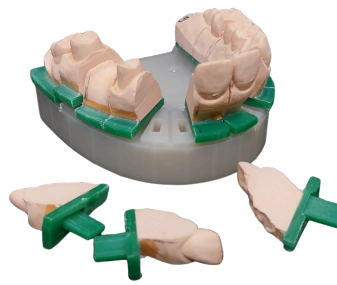

Full Arch type



Half Arch type

1. ติดตั้งโดยใช้แผ่น Dai-Tok เป็นฐาน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เข้าไปจนสุดอย่างแน่นหนาแล้ว



2. ตัดแต่งแบบจำลองด้วยเครื่องตัดแต่งโมเดล (Model Trimmer)



ตัดแต่งฐานของแบบจำลองให้มากกว่าปกติ และลดความสูงของแบบจำลองให้ต่ำลง

3. ทำการอบแห้งแบบจำลองด้วยเครื่องอบแห้งหรือเครื่องเป่าลมร้อน (Heat Gun)



หากแบบจำลองยังคงเปียกอยู่ การยึดติดจะไม่สมบูรณ์

4. ทาน้ำยาช่วยเร่งการยึดติด (ไพรเมอร์) บนพื้นผิวของแผ่นพลาสติก



แม้ไพรเมอร์จะแห้งแล้ว ก็ยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

ไพรเมอร์มีทั้งชนิดน้ำและชนิดสเปรย์



* ตัวอย่างสินค้าได้แก่เร่งการแข็งตัว (ไพรเมอร์) ไว้วงหน้าแล้ว

5. ติดแบบจำลองที่ตำแหน่งที่ฟันรองรับอยู่เหนือเตียง




โปรดใช้กาวที่มีลักษณะเป็นเจลความหนืดปานกลางแทนของเหลวที่มีความหนืดต่ำ

ติดโมเดลให้ฐานฟันตรงกับตำแหน่งของหมุด

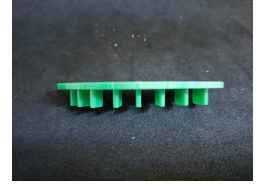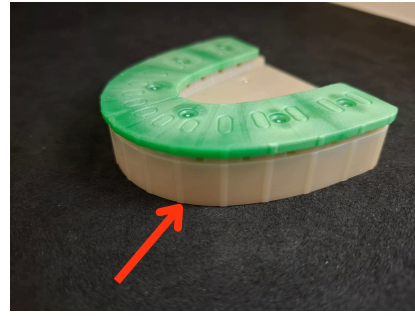

ตำแหน่งของเส้นฐานโมเดลและหมุดเชื่อมโยงกันสามารถตรวจสอบตำแหน่งของหมุดได้โดยการมองเส้นเป็นแนวทาง

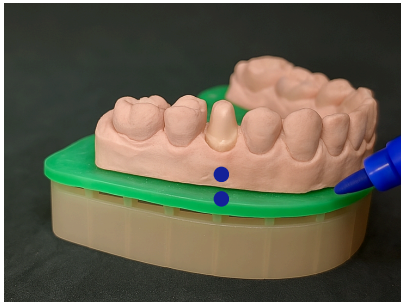

การทำเครื่องหมายบนโมเดลและแผ่นก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้การยึดติดเป็นไปได้อย่างราบรื่น



หากกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงในการยึดติด สามารถขุดร่องที่ด้านล่างของโมเดลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดได้



แผ่นถูกแบ่งออกเป็นสองด้านซ้ายขวา ดังนั้นไม่จำเป็นต้องติดในด้านตรงข้ามที่ไม่มีฐานฟัน การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในวัสดุ

5. ติดแบบจำลองที่ตำแหน่งที่ฟันรองรับอยู่เหนือเตียง



DAI-TOK มีความเข้ากันได้กับทุกชิ้นส่วน ดังนั้น หากเตรียมฐานที่ใช้สำหรับการตัดโดยเฉพาะจะสามารถใช้งานซ้ำได้โดยไม่ทำให้ฐานเกิดรอยขีดข่วน

6. การติดตั้งเครื่องกัด



หากใช้แผ่นยึดที่ขายแยกต่างหากก็สามารถติดตั้งเครื่องกัดได้เช่นกัน

เนื่องจากฐานโมเดลและแผ่นยึดสามารถถอดประกอบได้เหมือนกับบล็อกเลโก้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้แม่เหล็ก